

## **Vizol S INTENSIVE**

vitaminske kapi za suhe oči

Kapi su namijenjene ublažavanju smetnji suhog oka i obnavljanju površine oka.

### **1. SASTAV**

Natrijev klorid, natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, natrijev hidrogenfosfat bezvodni, natrijev hijaluronat 0,15%, dekspantenol 2%, voda pročišćena.

Bez konzervansa.

### **2. PAKIRANJE**

10 ml

### **3. NAMJENA**

Vizol S INTENSIVE kapi za oči namijenjene su ublažavanju laganih do umjerenih smetnji suhog oka, stabilizaciji suznog filma, podmazivanju oka čineći njegovu površinu glatkom.

Također, ublažavaju tegobe kod:

- mehaničkih iritacija površine oka uzrokovanih nošenjem leća, dijagnostičkim ili kirurškim zahvatima na oku),
- mehaničkih iritacija površine oka uzrokovanih vanjskim faktorima (vjetar, sunce, klorirana voda, liječenje lijekovima),
- preopterećenja oka (dugotrajan rad za računalom).

Primjena kapi omogućuje brže olakšanje navedenih tegoba.

Vizol S INTENSIVE kapi imaju dvojak učinak: sadrže natrijev hijaluronat koji vlaži i stabilizira suzni film te dekspantenol koji smiruje, štiti i pomaže u regeneraciji površine oka.

Smetnje suhog oka mogu se ublažiti i na taj način spriječiti komplikacije.

Suhoća oka može nastati zbog:

- operativnih zahvata, ozljeda na oku ili prisutnosti stranog predmeta u oku,
- poremećaja suznog filma uzrokovanog nedostatkom suza ili njihovim obilnim hlapljenjem što može dovesti do oštećenja površine oka i simptoma nelagode,
- okruženja (centralno grijanje, klimatizacijski uređaji, fluorescentno svjetlo, dim i vjetar),
- dugotrajnog rada za računalom,
- korištenja dekongestivnih kapi za oko,
- starenja,
- nošenja kontaktnih leća,
- spola (hormonske promjene u žena tijekom trudnoće, dojenja, menstruacije ili menopauze),
- lijekova (za liječenje depresije, povišenog tlaka, za sprečavanje začehčea),
- bolesti (reumatoidni artritis, šećerna bolest, astma, bolesti štitnjače, glaukom).

Vizol S INTENSIVE kapi mogu se koristiti i tijekom nošenja kontaktnih leća.

Tehnologija aplikatora bočice sadržava filter koji proizvod čini sigurnim za primjenu jer sprečava onečišćenje otopine nakon otvaranja.

#### **4. KADA I KAKO KORISTITI VIZOL S INTENSIVE?**

Kapi mogu se koristiti više puta dnevno, prema potrebi.

Ukapati 1 – 2 kapi u oko, trepnuti nekoliko puta kako bi se otopina ravnomjerno rasporedila po površini oka. Ne sadrže konzervanse te stoga nisu štetne za primjenu u oku.

#### **5. PROIZVOĐAČ**

JADRAN GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

#### **6. NAPOMENA**

Rok valjanosti nakon otvaranja: 180 dana.

Neposredno nakon ukapavanja kapi vaša se vidna sposobnost može umanjiti te za to kratko vrijeme ne vozite automobil i ne upravljajte vozilima i strojevima, već pričekajte da vam slika postane jasna.

Isprobajte i ostale kapi za suho oko iz Vizol S linije:

| Proizvod     | Namjena                              | Sastav                     | Uzrok smetnji  | Način primjene  | Korištenje s kontaktnim lećama | Osjećaj nakon nanošenja   |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------|--|---|--------------------------------|---|
| Vizol S 0,21 | Ublažavanje blažih smetnji suhog oka | Natrijev hijaluronat 0,21% | Nošenje leća, alergija, strano tijelo, vanjski čimbenici (suhi zrak, dim).             | Ukapat 1 – 2 kapi u oko, više puta na dan, odnosno prema potrebi. | Da                             | Trenutno osvježenje i dugotrajan osjećaj vlaženja.  |
| Vizol S 0,4  | Ublažavanje težih smetnji suhog oka  | Natrijev hijaluronat 0,4 % | Starenje, terapija lijekovima, agresivni vanjski čimbenici (vjetar, sunce, suhi zrak). | Ukapat 1 – 2 kapi u oko, više puta na dan, odnosno prema potrebi. | Ne                             | Trenutno olakšanje i dugotrajan osjećaj ugone i podmazivanja. Proizvod može trenutno zamagliti vid. |

## 7. ČUVANJE

Proizvod čuvati na temperaturi do 30 °C, u originalnoj ambalaži.

CE1304

## 8. DATUM REVIZIJE UPUTE

Lipanj, 2015.

## 9. OBJAŠNENJE SIMBOLA NA PROIZVODU



Pogledati upute za uporabu



Proizvođač



Rok valjanosti



30°C gornja granica temperature



Broj serije



CE oznaka

 Sterilno, aseptična tehnika obrade